

شرکت تجهیزات پزشکی آرمین درمان
نماینده انحصاری محصولات کمپانی beurer آلمان در ایران

beurer GS 400 / GS 405 / GS 410
SignatureLine



ترازوهای دیجیتال شیشه‌ای

- این دستگاه شامل دو سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد*

تهران خیابان کریمخان، خیابان میرزای شیرازی، کوچه ۱۳، پلاک ۳۴، طبقه دوم

۱. شروع به کار


GS 400:




GS 405+410:




- باتری را داخل ترازو قرار دهید یا نوار عایق را بیرون بکشید.

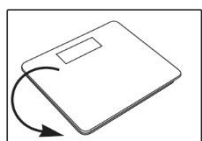


- می‌توانید ترازو را برای واحدهای مختلف وزن تنظیم کنید.

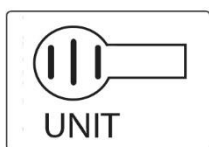

KG → LB → ST

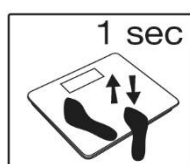


- توجه: نحوه استفاده از ترازو برای بار اول و نوبتهای بعد

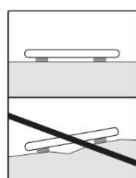


- ترازو را بر روی سطح صاف و ایمن قرار دهید.

خطر سر خوردن! با پاهای خیس روی ترازو پا نگذارید.
 خطر زمین خوردن! هرگز از یک سمت ترازو روی لبه
 بیرونی آن پا نگذارید.

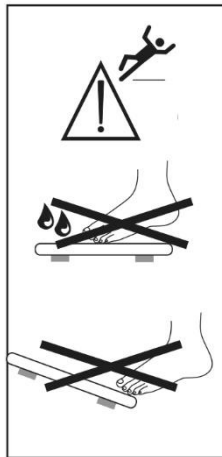

۲. وزن کردن

- روی ترازو بروید

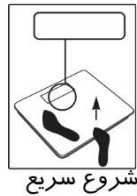


شروع سریع

- در حین وزن کردن صاف بایستید و حرکت نکنید.




۳. پیامهای خطا

- باتری خالی شده است.

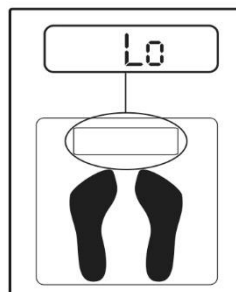

- وزن بالاتر از ظرفیت ترازو است.

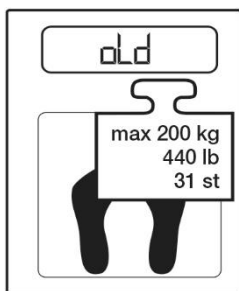

این دفترچه راهنما را با دقت بخوانید و برای استفاده در آینده نگه دارید.

دفترچه راهنما را در دسترس سایر کاربران قرار دهید. هشدارها و نکات ایمنی ذکر شده در آن را رعایت نمایید.

مشتری گرامی،

از انتخاب شما سپاسگزاریم. نام ما معرف محصولات با کیفیت بالا و کاملاً آزمایش شده برای کاربردها در زمینه گرما، وزن، فشارخون، دمای بدن، نبض، درمان ملایم، ماساژ، زیبایی، کودک و هوا است.





با احترام،

گروه بیورر

نشانه ها و نمادها

علائم زیر در این دفترچه راهنما، استفاده شده است

هشدار در مورد خطرات آسیب یا صدمه به سلامتی.	هشدار	
اطلاعات ایمنی در مورد آسیب احتمالی به دستگاه/لوازم جانبی.	احتیاط	
توجه به اطلاعات مهم.		
دفترچه راهنما را مطالعه کنید.		
بسته بندی را به روشی دوستدار محیط زیست دور بیندازید		
لطفاً دستگاه را مطابق با دستورالعمل EC - WEEE (ضایعات تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی) دور بیندازید.		

باتریهای حاوی مواد خطرناک را در زباله خانگی دور نریزید.	
سازنده	
این محصول تمامی الزامات متناسب با قوانین اروپایی و ملی را دارا است.	
محصولات به وضوح الزامات مقررات فنی اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) را برآورده می کنند.	

⚠ هشدار

- لوازم بسته بندی را در دسترس کودکان قرار ندهید.
- این ترازو مناسب استفاده تجاری نمی باشد.
- در صورت داشتن هر گونه سؤال در رابطه با عملکرد و استفاده از محصول با فروشنده یا خدمات مشتری تماس بگیرید.
- تعمیرات فقط باید توسط مرکز خدمات مشتری یا فرد متخصص انجام شود.

⚠ نکاتی در رابطه با استفاده از باتری

- اگر پوست یا چشمان شما با مایع باتری تماس پیدا کرد، نواحی آسیب دیده را زیر آب بشویید و به پزشک مراجعه کنید.
- **خطر خفگی!** باتریها را دور از دسترس کودکان قرار دهید. در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه کنید.
- به علائم قطب مثبت (+) و منفی (-) باتری توجه نمایید.
- اگر باتری نشت کرده است، دستکش محافظ بپوشید و محفظه باتری را با یک دستمال خشک تمیز کنید.
- باتری را در برابر گرمای شدید محافظت نمایید.
- **⚠ خطر انفجار!** باتری را در آتش نیندازید.
- باتریها را شارژ نکنید و در مدار کوتاه قرار ندهید.

- اگر قرار است برای مدت طولانی از دستگاه استفاده نشود، باتری را از دستگاه خارج کنید.
- فقط از انواع باتریهای یکسان یا یک نوع استفاده کنید.
- همیشه همه باتریها را همزمان تعویض کنید.
- از باتری های قابل شارژ استفاده نکنید!
- از باز کردن، مخدوش و له کردن باتری ها خودداری کنید.
- باتریهای کاملاً خالی باید از طریق مکانهای جمع آوری مشخص شده، نقاط بازیافت یا خرده فروشان لوازم الکترونیکی دور ریخته شوند. شما از نظر قانونی ملزم به دور انداختن باتریها هستید.

- کدهای زیر بر روی باتریهای حاوی مواد مضر، چاپ شده است:



Pb = باتری حاوی سرب است،

Cd = باتری حاوی کادمیوم است،

Hg = باتری حاوی جیوه است.



- به دلایل زیست محیطی، ترازو را در پایان عمر مفید آن در زباله‌های خانگی دور نیاندازید.

ترازو را به محل جمع آوری یا بازیافت مناسب تحویل دهید. دستگاه باید مطابق با دستورالعمل EC - WEEE (ضایعات تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی) دور انداخته شود.

اگر سؤالی دارید، لطفاً با مقامات محلی مسئول دفع زباله تماس بگیرید.

احتیاط

- ظرفیت ترازو حداکثر ۲۰۰ کیلوگرم (۴۴۰ پوند/۳۱ استون) و دقت ترازو ۱۰۰ گرم است.
- تمیز کردن: برای تمیز کردن ترازو از یک دستمال نمدار و در صورت لزوم کمی مایع شوینده استفاده کنید. هرگز ترازو را در آب فرو نبرید و در زیر آب روان نشویند.
- ترازو را در مقابل ضربه، رطوبت، گرد و خاک، مواد شیمیایی، تغییرات شدید دما و میدانهای مغناطیسی محافظت کرده و در مجاورت منابع گرمایی قرار ندهید.

- قبل از اعلام خرابی، لطفاً ابتدا باتریها را کنترل کرده و در صورت نیاز تعویض نمایید.



- بسته بندی را به روشی دوستدار محیط زیست دور بیندازید.

گارانتی

این دستگاه دارای ۲ سال گارانتی می باشد.

شرکت تجهیزات پزشکی آرمین درمان
نماینده انحصاری Beurer آلمان



تهران، خیابان کریمخان، خیابان میرزای شیرازی، کوچه ۱۳، پلاک ۳۴

کد پستی: ۱۵۸۵۷۷۳۴۱۵

تلفن: ۶- ۸۸۳۲۶۶۴۴

خدمات پس از فروش: ۸۸۸۶۴۸۷۲-۸۸۸۶۴۸۱۰