



فشار سنج بازویی دیجیتالی M3 (HEM-7154-E)




IM2-HEM-7154-E-03-01/2020
2870429-6B

All for Healthcare

دقت‌رچه‌ی راهنمای (۱) و (۲) را قبل از استفاده مطالعه نمایید.

۱ محتویات بسته

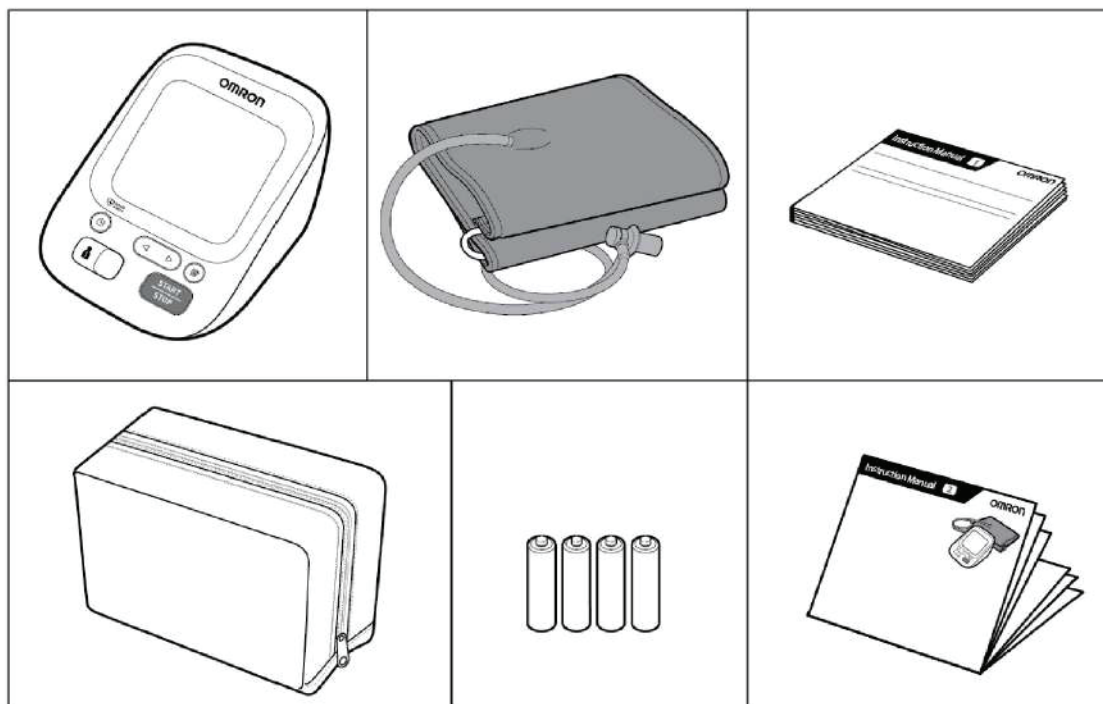


۲ آماده شدن برای اندازه گیری


۳۰ دقیقه قبل




۵ دقیقه قبل: آرام باشید و استراحت کنید.

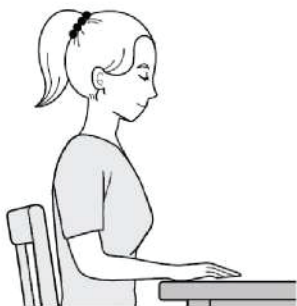


۳ قرار دادن باتری ها

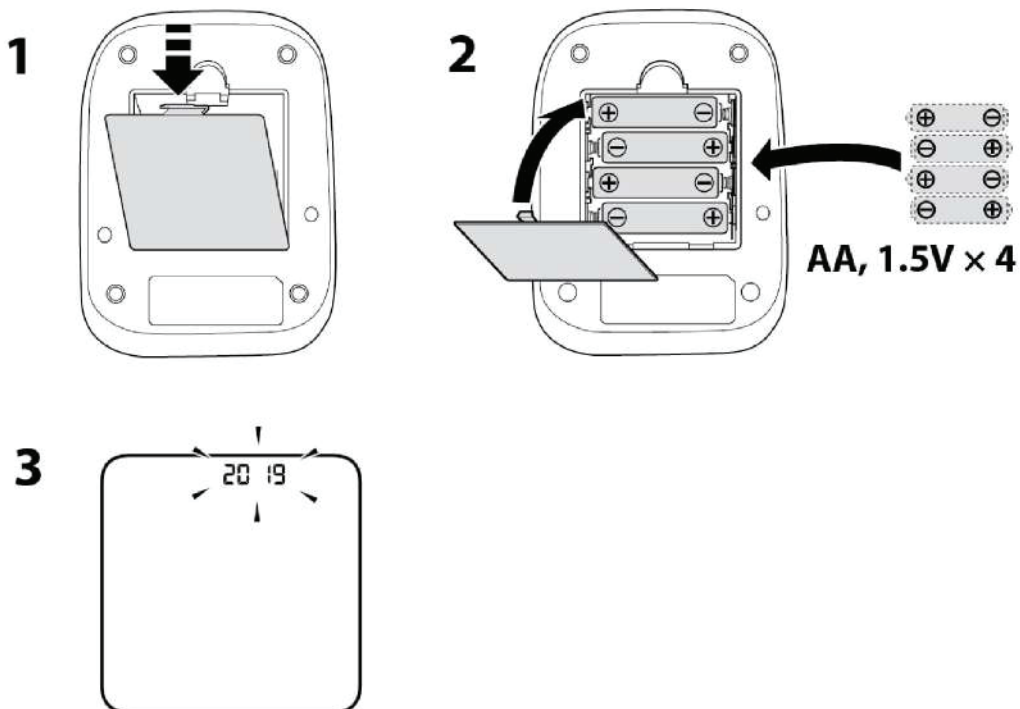

۳ قرار دادن باتری ها

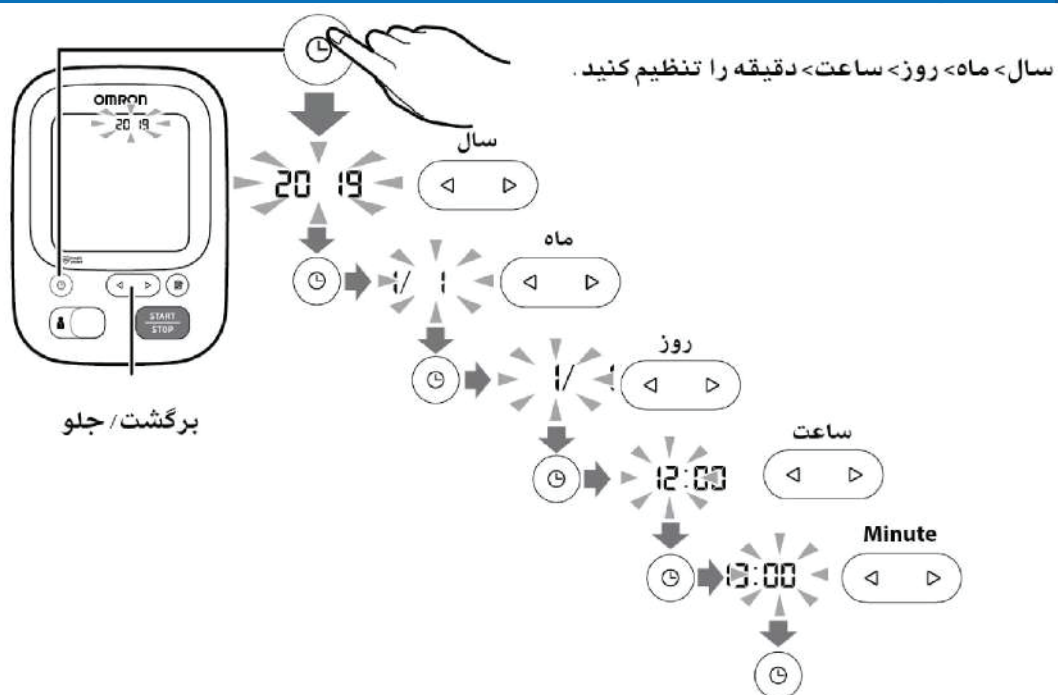

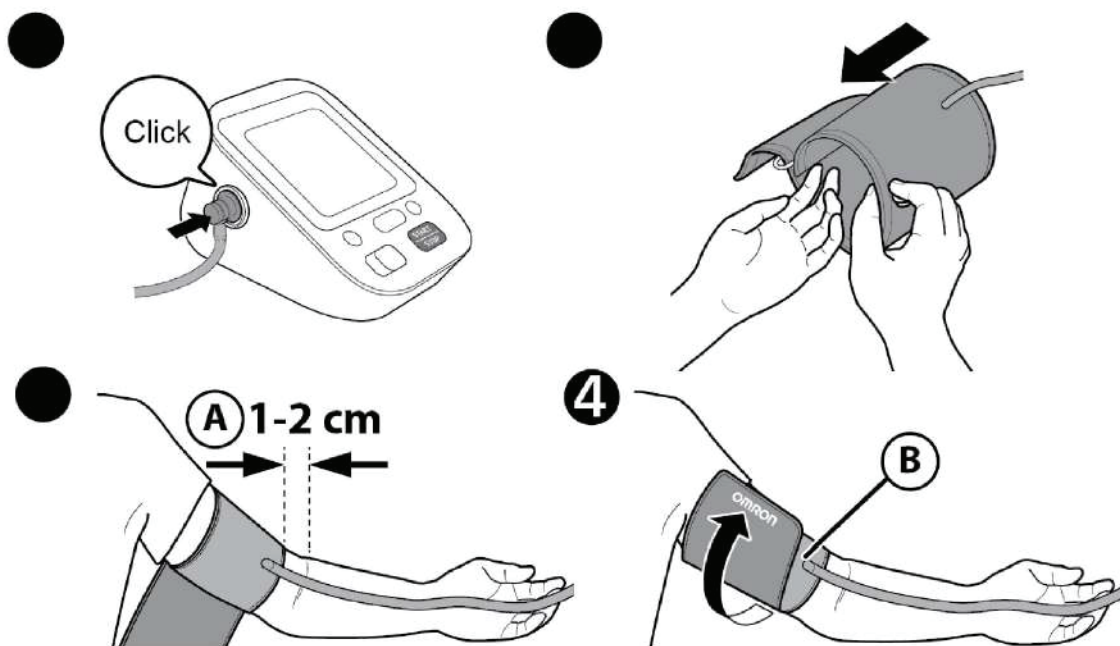


A از سمت لوله ، بازوبند باید ۱ تا ۲ سانتی متر بالاتر از داخل آرنج باشد .

B اطمینان حاصل کنید که لوله هوا در داخل بازو قرار دارد و بازوبند را به صورت صحیح ببندید تا دیگر نتواند به دور آن بپیچد .



در صورت اندازه گیری بازوی راست ، مراجعه نمایید:
بخش ۲.۳ دستورالعمل (۱)


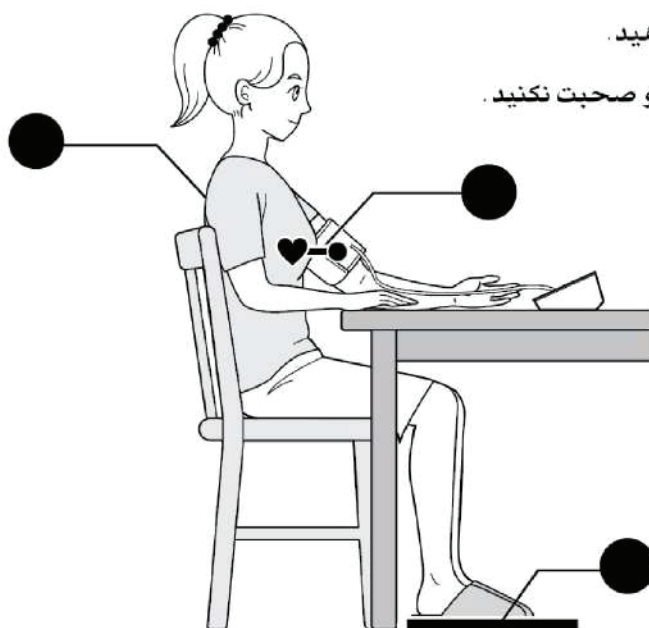


۱. راحت بنشینید و کمر و بازو را تکیه دهید .


۲. بازوبند را هم سطح قلب قرار دهید .

۳. پاها را صاف نگه دارید . ساکت بمانید و صحبت نکنید .

تعویض کاربر به شما امکان می دهد سنجش ها را برای ۲ نفر ذخیره کنید.

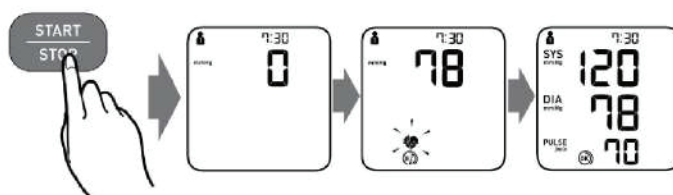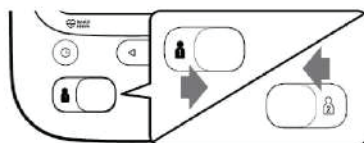

با فشار دادن دکمه [START/STOP]، اندازه گیری به طور خودکار انجام می شود و ذخیره می شود. اندازه گیری در حالت مهمان از حالت مهمان می توان برای تنها یک اندازه گیری برای کاربر دیگر می توان استفاده کرد. هیچ اندازه گیری و سنجشی در حافظه ذخیره نمی شود.

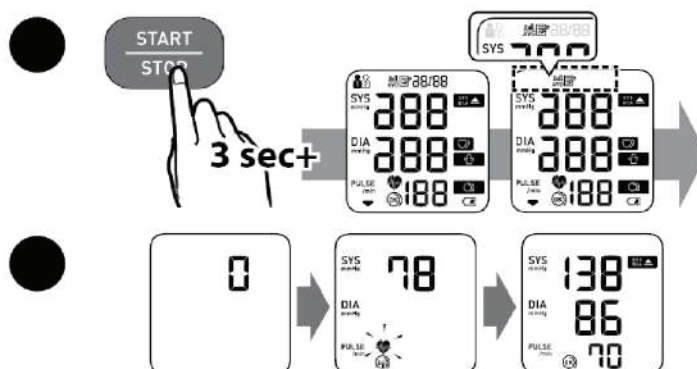


۱. اگر "SYS" ۱۳۵mmHg یا بالاتر و یا "DIA" ۸۵mmHg یا بالاتر باشد، نشان داده می شود.

۲. وقتی ریتم نامنظم هنگام اندازه گیری تشخیص داده می شود، ظاهر می شود. در صورت ادامه نمایش آن، توصیه می شود با پزشک خود مشورت کنید.

۳. هنگامی که بدن شما حین اندازه گیری حرکت می کند، ظاهر می شود. بازوبند را بردارید. ۲-۳ دقیقه صبر کنید و دوباره امتحان کنید.

۴. کاف به اندازه ی کافی محکم است.


۴. دوباره کاف را محکم کنید.

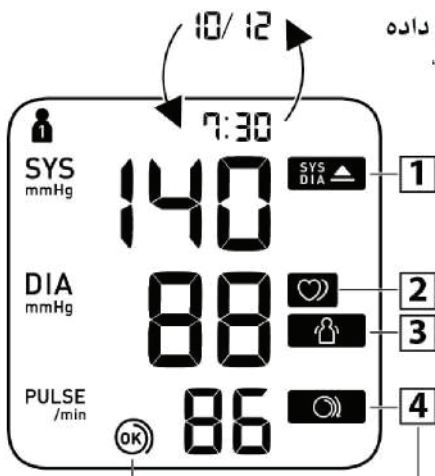

**تعریف و تعیین فشار خون بالا براساس دستورالعمل های 2018 ESH / ESC است.
 **ریتم ضربان قلب نامنظم به ریتمی گفته می شود که ۲۵٪ کمتر یا ۲۵٪ بیشتر از متوسط ریتم تشخیص داده شده در طول اندازه گیری باشد.


E1
E2
:


برای خطا یا مشکلات دیگر، مراجعه نمایید:
 بخش ۳ دستورالعمل ۱




۱۰ استفاده از حافظه ی دستگاه

قبل از استفاده از قسمت حافظه ی دستگاه ، کاربری خود را انتخاب کنید.

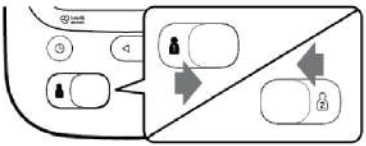

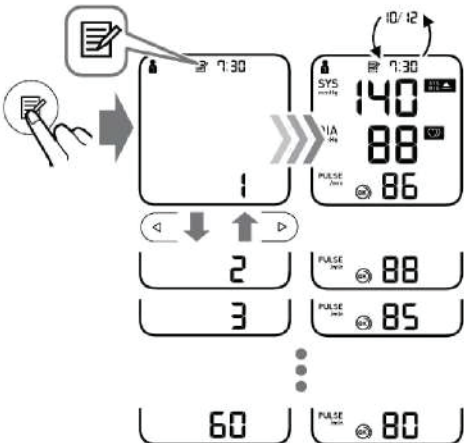


۱۰.۱. اندازه گیری های ذخیره شده در حافظه حداکثر ۶۰ اندازه گیری را ذخیره می کند.

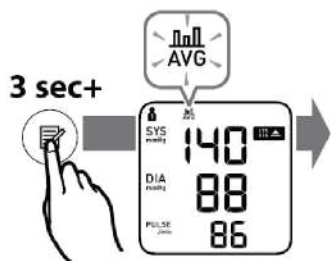


۱۰.۲. میانگین ۲ الی ۳ بار آخر که در بازه ی ۱۰ دقیقه اندازه گیری شده است

۱۰.۳. حذف تمام اندازه گیری ها

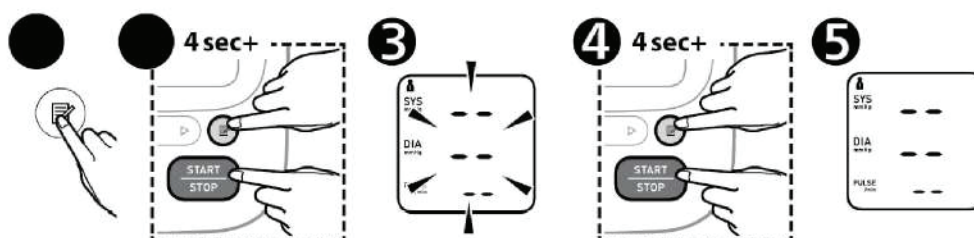


۱۱.۱. بازگردانی به تنظیمات پیش فرض

اگر فشار سیستولیک شما بیش از ۲۱۰ mmHg است؛ پس از شروع باد شدن بازوبند، دکمه [START/STOP] را فشار داده و نگه دارید تا زمانی که مانیتور ۳۰ تا ۴۰ mmHg بالاتر از فشار سیستولیک مورد انتظار شما باد شود.

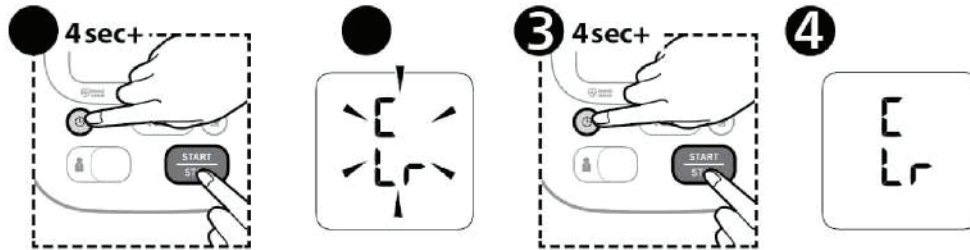

۱۲ اجزای انتخابی

اتصال لوله ی هوا را دور نیندازید چراکه می تواند برای کاف جانبی دیگر قابل استفاده باشد.

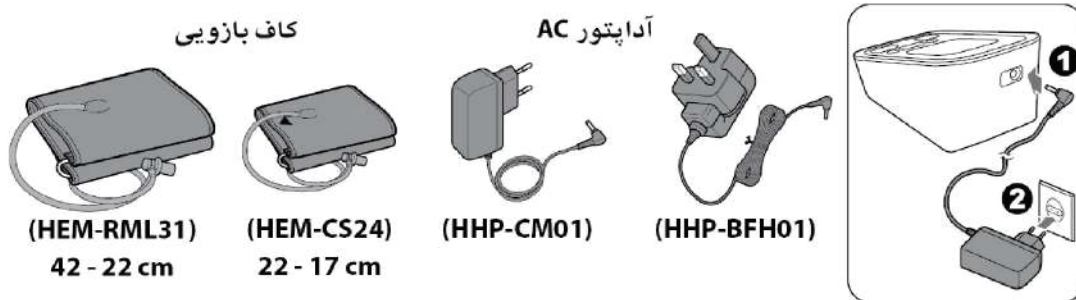

شرکت OMRON HEALTHCARE کیوتو، ژاپن	تولید کننده
شرکت OMRON HEALTHCARE اروپا هلند www.omron-healthcare.com	نماینده اتحادیه اروپا
شرکت OMRON HEALTHCARE کارخانه Matsusaka ژاپن	تاسیسات تولید
شرکت OMRON HEALTHCARE	شرکت های تابعه
شرکت OMRON HEALTHCARE	
شرکت OMRON SANTÉ FRANCE	

ساخت ژاپن

<https://www.omron-healthcare.com/>